

介助用自動ラップ式トイレ ラップポン・ブリオ

ラップポンのある 介護生活

介護生活の中で排泄に関する悩みの臭い・不衛生さ・バケツ洗浄の手間は、ご本人だけでなくご家族の負担も増していきます。介護する側もされる側もトイレの負担を減らし、精神的にゆとりのある介護生活の実現に貢献します。

熱圧着によって排泄毎に1個ずつ個包装します。
介護生活の中で排泄に関する悩みの臭い・不衛生さ・バケツ洗浄の手間は、ご本人だけでなくご家族の負担も増していきます。
介護する側もされる側もトイレの負担を減らし、精神的にゆとりのある介護生活の実現に貢献します。

ラップ式排泄処理ユニットとは

バケツ洗浄不要

日本セイフティー（株）が開発した自動ラップ機構は、水を使わず熱圧着によって排泄物を密封します。排泄介護の中でも介助者の負担が大きいバケツ洗浄や後片付けの手間から開放され、毎回衛生的に密封することで、使用する方は自尊心を持った排泄ができます。

嫌な匂いを軽減

専用フィルムで排泄物を毎回個包装するため、室内への臭いの拡散を防止します。介助者や使用する方の臭いに対する負担を取り除きます。



低価格

専用フィルムと凝固剤を使用して、1回あたり約50円です。経済的な負担をやわらげ、排泄行為の環境を整えることができます。



使い方

- 

凝固剤を入れます
ラップポン専用の凝固剤カクメルサー・紙を約1杯入れます。
- 

用を足します
必ず座ってご使用ください。
- 

作動ボタンを押します
ご使用後、立ってから手元スイッチの作動ボタンを押します。
- 

状態ランプを確認します
約2分後、状態ランプが緑点灯に変わり、「ピッピッ」と音がなったら処理終了です。
- 

袋を取り出します
トレーを引き出し、ラップされた排泄ゴミを指定のゴミ箱に捨てます。